



Ayudas especiales para perros



Silla de ruedas para perros de entre 4 y 11 kg.

Manual de instrucciones

*Con instrucciones adicionales
para kit de ruedas delanteras compatibles*

Contenido

Comienzo rápido	3
Partes de la silla de ruedas	4
Consejos para enseñar a tu perro cómo usar la silla	5
Montando la silla de ruedas	6
Utilizar los botones a presión para ajustar la longitud, anchura y altura	7
Ajustando la longitud	7
¿La longitud es correcta?	7
Ajustando la anchura	8
Colocación de las barras y las ruedas	8
Ajustando la altura	8
Estribos suspensores	9
Acoplado el arnés tubular trasero	10
Arnés delantero	11
Cambio y colocación de la pieza tridente del arnés delantero	12
¿Está la silla ajustada correctamente?	13
Tornillos de fijación opcionales para reducción de vibraciones	14
Cinturón para el abdomen	15
Accesorio de ruedas delanteras	16
Partes incluidas en el paquete de ruedas delanteras	16
Montaje del accesorio de ruedas delanteras a la silla	17
Cómo introducir al perro en la silla con el accesorio de ruedas delanteras	18
Desgaste, Mantenimiento, Responsabilidad y Garantía	18

Comienzo rápido

1. Configurar la longitud de la silla de ruedas, la altura, y la anchura
2. Fijar arnés tubular trasero
3. Poner arnés delantero en el perro
4. Poner al perro en la silla de ruedas:
5. Ahora que el perro lleva puesto el arnés delantero, estará listo para comenzar. La silla de ruedas debe colocarse con sus barras extensoras (barras laterales) inclinadas hacia el suelo. Colocarse detrás de la silla de ruedas, levantar las piernas hacia arriba y colocar las patas del perro en los anillos del arnés tubular trasero (si el perro es liviano, se puede levantar para hacerlo). Cuando las piernas atraviesen los anillos, tirar de las barras extensoras. Deslizar cada extensor a través del anillo en D en el arnés delantero y enganchar.

Consejos para ajustar la longitud y la anchura mientras el perro está en la silla de ruedas:

- Altura: las almohadillas de las pezuñas traseras solo tocan el suelo
- Longitud: los extensores laterales no van más allá de la pata delantera
- Ancho: parte más ancha del perro (generalmente el pecho)



Partes de la silla de ruedas



Marco de la silla de ruedas de aluminio con barra conectora de anchura y extensores laterales instalados.



Conector de ancho de 10 cm instalado en el marco. Usar el de 18 cm para los perros más anchos.



Barras extensoras de longitud. Ya vienen instaladas en la silla.



Articulación atornillada al marco



Juego de herramientas con llave Allen para reducción del ruido



Arnés delantero



Cinturón para el abdomen. Usar si fuera necesario.



Estribos suspensores para pies.



Arnés tubular trasero



Ruedas de 10 cm y barras

Consejos para enseñar al perro a usar la silla

Ofrecemos esta silla con la intención de que se ajuste de la forma adecuada, se coloque al perro dentro de ella y en unos momentos se ponga a correr y jugar de nuevo. Suele ser así de fácil, pero no siempre. Una silla de ruedas puede requerir de un tiempo de adaptación. Para algunos perros, es un extraño dispositivo que lo sigue allá donde va, haciendo ruidos extraños, y golpeándose con muebles y puertas. Se adaptarán a estos cambios, pero necesitarán un poco de tiempo. Recomendamos que estés muy tranquilo cuando coloques la silla de ruedas por primera vez. Se necesitan muchas caricias, consuelo y algún premio, como algo de comida, para que camine por voluntad propia. Deja que el perro se acostumbre al arnés antes de ensamblarlo a la silla de ruedas autoajustable.



1. Al comenzar este proceso, sugerimos ayudarse de los alimentos favoritos del perro como recompensa. ¡Un perro hambriento es un perro motivado!
2. No colocar inmediatamente al perro en la silla de ruedas. Montar la silla y dejarla en una área donde el perro pueda verla, olerla y tocarla.
3. Una vez que el perro se siente cómodo cerca de la silla de ruedas, colocar el arnés delantero y dejar que el perro se acostumbre a la sensación de las correas.
4. Cuando el perro esté cómodo, intenta poner sus patas en el arnés tubular trasero y acople el arnés delantero a la silla de ruedas.
5. Cuando el perro esté en la silla de ruedas sostener el premio de comida justo a la altura de su nariz. Premiar varias veces. Desplazarse un paso atrás y repetir el proceso con la comida. Él debería caminar hacia ti para obtener el premio.
6. Trabajar en sesiones muy cortas (5-10) minutos, varias veces al día.

Nota: Hacer todo este trabajo en un lugar despejado y con una correa corta. Si el perro se asusta, entonces desconectar el arnés de la silla de ruedas y volver a intentarlo más tarde. Los perros no pueden tumbarse totalmente con la silla de ruedas, pero podrán orinar y defecar con ella.

Comenzar con períodos cortos y aumentar lentamente.

Montando la silla de ruedas

Utilizar los botones a presión para ajustar la longitud, la anchura y la altura.



Los botones a presión son una manera fácil de ajustar la longitud, el ancho y la altura de la silla de ruedas. Puedes usar un bolígrafo para ayudarte.

Ajustando la longitud

Nota: Si tiene el accesorio de la rueda delantera, hay que quitar los extensores y saltar a la página 16.



Las barras extensoras son para ajustes de longitud. El kit viene con un par, ya instaladas. Para ajustar las barras, presionar el botón de ajuste.

¿La longitud es correcta?

El final de los extensores debe colocarse a la altura del centro de los omóplatos del perro. Los extensores deben tocar las almohadillas de neopreno del arnés delantero y no tirar hacia afuera.

Ajustando la anchura

Usar los botones de ajuste de la barra conectora de ancho para ajustar la silla de ruedas al ancho adecuado. Debe haber al menos 1,5 cm a cada lado de las

caderas. El ajuste del ancho vendrá determinado por la parte más ancha del perro, que generalmente es el pecho. La barra conectora de ancho que viene

instalada en el marco es de 10 cm de largo y se extenderá a 16,5 cm. Una barra de 18 cm, que también se incluye, servirá para perros que necesitan más ancho (de 18 cm a 23 cm). Si necesita un ancho adicional más allá de eso, contacte con nosotros para solicitar el conector de ancho de 25 cm WWC10-Small.



Colocación de las ruedas y sus barras

Insertar la barra de la rueda en la pata de la silla y ajustar a la altura necesaria. Si necesita un tamaño diferente de rueda o barra, contáctenos.




Ajustando la altura



La configuración de altura correcta se basa en la altura y la condición del perro. Si el perro puede hacer uso de su pata o sus patas traseras, usar los botones para ajustar la altura con el fin de que las almohadillas de los pies del perro toquen el suelo y el perro pueda participar en el movimiento al caminar. Si las patas traseras están muy débiles, entonces las pezuñas o las falanges pueden rozar en el suelo. En este caso, hay que colocar las patas en los estribos o protegerlas con una de nuestras botas.

La configuración de fábrica de esta silla de ruedas servirá para la mayoría de los perros de entre 4 y 11 kgs. Sin embargo, hay un ajuste adicional que se puede hacer para aumentar aún más la altura. Las piernas pueden estar en posición "piernas largas" o "piernas cortas" (ver fotos en las páginas 3 y 5). Las sillas de ruedas son típicamente enviadas con las ruedas en la posición "piernas cortas".

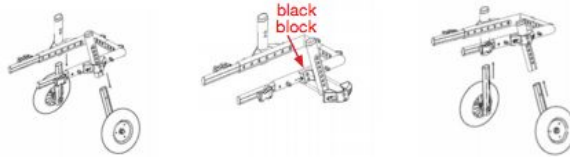

Usar un destornillador Phillips para cambiar la posición de la pata de la silla:

1. Retirar el tornillo de fijación y el puntal de la rueda.
2. Aflojar la articulación atornillada al marco con un destornillador Phillips, manteniendo los tornillos y arandelas en su lugar.
3. Cambiar la posición de la pata de la silla en la configuración alta donde están los dos agujeros en el interior de su interior..
4. Alinear la articulación atornillada al marco y volver a apretar los tornillos.
5. Asegurarse de mantener las arandelas en su lugar dentro de los tornillos. Asegurarse de que el pequeño bloque negro no está instalado al revés.



Las piezas izquierda y derecha son diferentes. Vas a ver una L o R dentro del bloque de las piezas negras de plástico para indicar la posición correcta. La L significa izquierda y la R derecha.

Estribos suspensores de pies


Los estribos son opcionales para las patas que se arrastran debido a una total incapacidad de movimiento de estas. Los estribos se acoplan a la parte posterior de la silla de ruedas en las piezas de metal plateado. Los tubos de goma de los estribos deben estar por encima del corvejón del perro, a la altura del tarso. La pierna del perro debe estar a varios centímetros del suelo. Se puede ajustar la longitud del cable volviendo a reanudar el nudo. Si se usan los estribos, use ambos; si se utiliza solo uno el perro se sentirá desequilibrado.

IMPORTANTE: cuando se saque al perro de la silla de ruedas, hay que asegurarse de soltar los estribos PRIMERO.



Arnés tubular trasero

Este arnés tubular sostiene los cuartos traseros del perro. Reduce el peso que deben cargar las extremidades y, al mismo tiempo, aumenta el tiempo de trabajo de sus músculos. Este arnés debe ofrecer una cierta firmeza. Los aros de las piernas no deben colgar a menos de 2 centímetros por debajo del marco. Es decir, que la comba que hacen en la silla no sea superior a esos 2 centímetros.

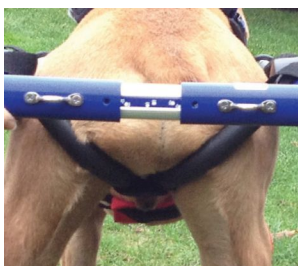

Cuando el perro está dentro, la articulación articulada de la silla de ruedas debe quedar en medio de la cadera.

Acoplando el arnés tubular trasero a la silla

Las correas del arnés tubular van por encima del marco y los clips de plástico negro tienen una ranura que se ajusta sobre los tornillos cercanos a la rótula. Empujar hacia arriba, con cierta fuerza, hasta oír "click", para bloquear. La parte circular ha de estar en dirección al suelo. Para retirar los clips, poner su pulgar en el círculo y tirar hacia abajo. En este momento, se podrá bajar lentamente su perro al suelo. Las tiras de velcro deben ir cruzadas por encima de la cadera. El conector de velcro del arnés tubular se puede mover hacia adelante o hacia atrás para evitar la presión sobre los genitales del perro. Además, el conector de velcro puede aflojarse para que haya espacio entre los dos tubulares que componen el arnés.



El arnés tubular se puede acortar con unas tijeras si es necesario (pero no cortes la correa interior). Intenta cortar aproximadamente unos dos centímetros de uno de los extremos de cada tubo y ajustarlo según la necesidad.

Extender las barras extensoras para que lleguen a los clips del arnés delantero. Los extensores han de pasar por los anillos (que han de estar situados por detrás de los omóplatos) y luego engancharse al arnés delantero.

Arnés delantero



- Quitar las 3 mangas protectoras del arnés para poder hacer los ajustes fácilmente.
- La cabeza del perro va entre las correas negras
- La correa roja se coloca por detrás de las patas traseras y se engancha al clip lateral del arnés.
- La correa negra va por debajo del cuello, al frente del pecho.
- Las tres correas deben estar ajustadas.

Las mangas protectoras se pueden cortar en caso de perros más pequeños y el exceso de tiras y correas introducirse dentro de ellas. Este material no se desgasta.



Cambio y colocación de la pieza tridente del arnés delantero (opcional)


Aunque las correas del arnés delantero son ajustables y, gracias a ello, se puede regular el arnés y el ángulo de las barras extensoras, también se puede conseguir esto último mediante la colocación de las piezas tridente en los espacios entre costuras del arnés. Recuerde que los tridentes deben mirar a la parte trasera del perro.

Partes:





¿Está la silla ajustada correctamente?

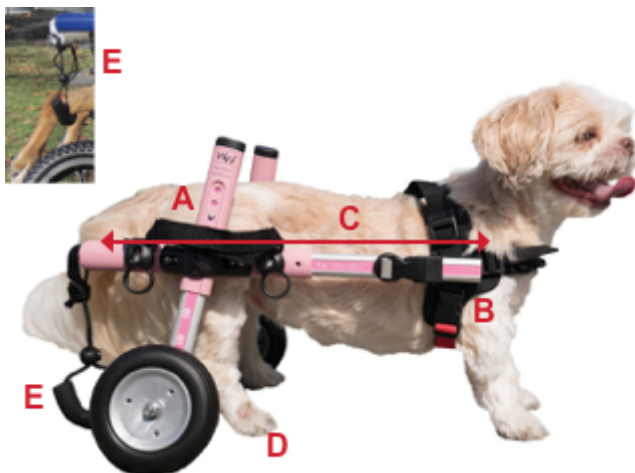

Cuando la silla de ruedas se ajusta correctamente, el perro se coloca en una posición natural.

Esto es lo que se debe verificar:

A Las articulaciones negras atornilladas a la silla deben estar en línea con las caderas.

B Las barras extensoras tienen que pasar por los anillos de los clips de enganche. La espalda debe estar recta.

C Las barras extensoras han de estar paralelos al suelo y no deben extenderse más allá de las patas delanteras.

D / E Las almohadillas de los pies tocan el suelo o se colocan en los estribos.



Incorrecto

Si las barras extensoras se inclinan hacia arriba, aflojar la correa negra del arnés delantero, sobre la espalda del perro, y apretar la correa inferior roja.



Incorrecto

Si las barras extensoras se inclinan hacia abajo, aflojar la correa inferior roja y apretar la correa negra sobre la espalda del perro para elevar los extensores.



Correcto

Las barras extensoras deberían estar paralelas al suelo, y centradas en la mitad del cuerpo.

Tornillos de fijación opcionales para reducción de vibraciones

Usar los tornillos de fijación compacta la silla de ruedas y reducirá cualquier vibración o cimbreo, pero son opcionales. Los tornillos de ajuste también mantienen apretada la silla de ruedas después de haber sido ajustada para el perro. Cuando se apriete la silla de ruedas, los brazos laterales podrán moverse hacia arriba y hacia abajo a medida que la mascota gire en las esquinas. Esto es completamente normal. La flexibilidad también permite la facilidad de movimiento en terreno desigual. Hay seis lugares para colocar los tornillos de fijación con la llave Allen. No apretar demasiado. Se indican a continuación con flechas.



Cinturón para el abdomen

Algunos animales necesitarán apoyo adicional debajo de su vientre. Es útil en casos en los que la columna vertebral se inclina hacia abajo. También es útil para perros con sobrepeso o perros con problemas espinales o de disco.




- A.** Toma el lado con el clip macho y pon el extensor a través del bucle.
- B.** Coge la cuerda y coloca el clip del arnés en el extensor. Después de enganchar el arnés delantero al clip del arnés, la cuerda quedará asegurada. Esto evitará que la correa del vientre se deslice hacia atrás. Ahora, ajusta el cinturón del vientre por lo que está en el medio del vientre del perro.
- C.** Asegura el otro lado sobre el extensor y el velcro a la parte inferior del cinturón. El propósito del cinturón del abdomen es proporcionar soporte para el perro en la sección media.

Accesorio de ruedas delanteras

El accesorio de ruedas delanteras brinda movilidad a los perros con debilidad en las patas delanteras o debilidad en las cuatro patas. Es ideal para ayudar a las mascotas discapacitadas a hacer ejercicio y rehabilitarse mientras están sanando.

Cinturón para el abdomen

Algunos animales necesitarán apoyo adicional debajo de su vientre. Es útil en casos en los que la columna vertebral se inclina hacia abajo. También es útil para perros con sobrepeso o perros con problemas espinales o de disco.

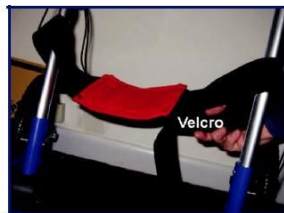

- A.** Toma el lado con el clip macho y pon el extensor a través del bucle.
- B.** Coge la cuerda y coloca el clip del arnés en el extensor. Después de enganchar el arnés delantero al clip del arnés, la cuerda quedará asegurada. Esto evitará que la correa del vientre se deslice hacia atrás. Ahora, ajusta el cinturón del vientre por lo que está en el medio del vientre del perro.
- C.** Asegura el otro lado sobre el extensor y el velcro a la parte inferior del cinturón. El propósito del cinturón del abdomen es proporcionar soporte para el perro en la sección media.

Accesorio de ruedas delanteras (se vende por separado)

El accesorio de ruedas delanteras posibilita la movilidad a los perros con debilidad en las patas delanteras o debilidad en las cuatro patas. Es ideal para ayudar a los perros discapacitados a hacer ejercicio y o rehabilitación.



Partes incluidas en el paquete

Los accesorios del kit de rueda delantera son fáciles de montar en la silla de ruedas autoajustable. Tan solo necesitarás un destornillador con cabezal Phillips (o de estrella).

El paquete contiene:



A: Barras extensoras de longitud.

B: Patas en las que se instalan la ruedas

C1: Ruedas de 7'5 cm con adaptador de rueda (o C2: Rueda de 5 cm unida a la barra)

D: Arnés tubular para patas delanteras

E: Bolsa de tornillos (solo para reemplazos, si es necesario)

IMPORTANTE: Los puntales y ruedas (B) IZQUIERDO y DERECHO deben emparejar las piernas IZQUIERDA y DERECHA (C). Si no están instalados

correctamente la silla de ruedas quiere ser extremadamente inestable. Es crucial que las patas estén instaladas en el lado correcto. Los extensores no están etiquetados L o R pero los tornillos de la base del hombro están orientados hacia el exterior.

Montaje del accesorio de ruedas delanteras

Paso 1 - Longitud: Extensores izquierdo y derecho (A y B)

Sacar los extensores laterales existentes en la silla de ruedas trasera y reemplaza con los extensores de la rueda delantera.

Paso 2 - Altura: Barras y ruedas (C1 o C2)

Insertar los puntales en las patas, asegurándose de que la izquierda y la derecha están en el lado correcto.

Paso 3 - Arnés tubular para patas delanteras (D)

Instalar los aros para las patas (p.10). Las correas cubren el marco; insertar el clip de plástico negro y empujar hacia arriba.

Se escuchará un clic cuando esté bloqueado en su lugar. La forma de los tubulares debería asemejarse a dos C y no a dos V.

La pierna del perro irá dentro de cada "anillo" para sostener su cuerpo en el frente. Los anillos de las patas delanteras pueden ser más bajos que los anillos traseros de las piernas traseras.

Paso 4 - Ancho:

Ajuste el ancho de acuerdo al tamaño del pecho de su perro (que generalmente es el área más amplia).



Cómo introducir al perro en la silla con el accesorio de ruedas delanteras

Hay muchas maneras de poner a su perro en la silla de ruedas. Algunos consejos básicos:

Altura: establecer la altura de forma que las almohadillas de las pezuñas del perro toquen el suelo. Los extensores laterales deben estar paralelos al suelo.

Longitud: las patas delanteras del perro deben quedar a alineadas con los enganches del arnés delantero, a la altura de los hombros.

Ancho: el ancho está determinado por la parte más ancha del perro (generalmente el pecho del perro). Dejar al menos un par de centímetros de espacio en ambos lados.

Arnés tubular: los aros tubulares delanteros generalmente necesitan estar un poco más bajos que los traseros, para acomodar el pecho, más corpulento, del perro. Ajuste los anillos de las piernas en consecuencia.



Desgaste, mantenimiento, responsabilidad y garantía

Mantenimiento

Con un uso y mantenimiento adecuados, la silla de ruedas está diseñada para durar toda la vida.

Si se necesitan piezas de repuesto para las ruedas, arneses, y otros artículos desgastados, se pueden comprar en Ortocanis.com. El marco de la silla de ruedas no se oxidará. Si entra suciedad o arena dentro de la silla de ruedas, puede limpiarlo con una manguera. Todos los componentes se pueden quitar y limpiar. Engrasar no es necesario.

Garantía

La silla está garantizada por el fabricante, durante dos años a partir de la fecha de compra contra defectos en material o mano de obra del marco (con la excepción del desgaste normal del arnés y ruedas). Si algo se rompe, infórmenos y se reparará o reemplazará el silla de ruedas a nuestra opción. El cliente es responsable de todos los gastos de envío. Garantía intransferible.

Política de devolución

Si prueba la silla de ruedas y no funciona para en tu perro debido al diseño o a la forma, llámenos antes de que pasen 14 días a partir del día en que compró la silla de ruedas. Si es posible devolverla en las mismas condiciones en las que la recibió, sin señales de uso, restos de pelos u olores o packaging dañado, puede ser candidato a un abono. Si la silla tiene señales de haber sido utilizada se restará un porcentaje del valor de compra.